

Standard+ Nitrile onderzoekshandschoenen

Onze hoogwaardige standaard onderzoekshandschoen voor brede inzet



Productomschrijving

Deze handschoen voldoet aan alle verplichte Europese normen voor onderzoekshandschoen en is daarmee breed inzetbaar voor niet-steriele, niet- tot laag-chemische, kortdurende medische handelingen. De handschoen is gemaakt van doorontwikkelde materialen waardoor de handschoen zeer dun is en aanvoelt als een 'tweede huid', maar tegelijkertijd wel de juiste treksterkte heeft.

Dit product is optimaal geschikt voor care- en cure-organisaties die een handschoen willen die zo breed mogelijk inzetbaar is. De aantoonbare geschiktheid voor gebruik met cytostatica toont hier ook aan bij (zie ASTM D6978-05 resultaten in deze brochure). Als er specifieke aanvullende eisen gelden zoals versneller-vrijheid, bredere chemische bestendigheid of een dikkere handschoen, dan verwijzen wij u door naar de andere nitril onderzoekshandschoenen in ons assortiment Handbescherming.

Wij leveren deze handschoen standaard verpakt per 200 (maat XS t/m L) of 180 (maat XL) stuks per doosje. Afwijkende verpakkingseenheden zijn op aanvraag bespreekbaar.



Deze handschoen is geschikt voor gebruik in onze Protextra™ Goodpac+™ cuff-first-verpakkingen. Zie de bestelgegevens in de separate tabellen. Deze verpakkingen bieden zeer tastbare voordelen op het gebied van infectiepreventie en duurzaamheid. Voor meer informatie over de toegevoegde waarde van deze verpakkingen kunt u de brochure downloaden op deze productpagina.

Productspecificaties

Certificering	<ul style="list-style-type: none"> • Geproduceerd volgens ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 • EU Conformiteitsverklaring (MDR & PBM) • PBM cat. III gecertificeerd (EU Type Examination) • FDA 510(k)-, REACH- en RoHS compliant 																
Aangemelde instantie (CE)	SATRA Technology Europe Limited Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Ierland CE-code: 2777																
Klassificering	<ul style="list-style-type: none"> • Medisch Hulpmiddel Klasse I (MDR EU2017/745 Annex VIII) • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) cat. III 																
Dikte	Palm: 0.05 mm, vingers: 0.08 mm (+/- 0.02)																
Maatvoering	XS – S – M – L - XL																
AQL	1.5																
Afmetingen	>240mm voor alle maten																
Materiaal	Nitril																
Kleur	Violetblauw																
Voornaamste normeringen	<ul style="list-style-type: none"> • ASTM D6319, ASTM D7160, ASTM D7161 & ASTM D6978-05 • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 & EN 455-4 • EN ISO 21420:2020 • EN ISO 374-1:2016+A1:2018 • EN 374-2:2014 • EN 16523-1:2015+A1:2018 (Type B) • EN 374-4:2013 • EN ISO 374-5:2016 (Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen) • EN 421:2010 																
Treksterkte	<p>1. Conform EN455-2 (Europa): tenminste 6N, zowel voor als na veroudering (aging).</p> <p>2. Conform ASTM D6319 (USA): tenminste 18 Mpa voor veroudering (aging) en tenminste 16 Mpa na veroudering (aging)</p>																
Chemische prestaties	Type B conform EN16523-1:2015+A1 :2018 : <table border="1" data-bbox="475 1693 1402 1939"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Omschrijving</th> <th>Niveau</th> <th>Degradatie conform EN ISO 374-4:2019 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K</td> <td>Sodium hydroxide 40%</td> <td>6</td> <td>-25.7</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>Hydrogen Peroxide 30%</td> <td>2</td> <td>44.8</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>Formaldehyde 37%</td> <td>5</td> <td>-17.1</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Omschrijving	Niveau	Degradatie conform EN ISO 374-4:2019 (%)	K	Sodium hydroxide 40%	6	-25.7	P	Hydrogen Peroxide 30%	2	44.8	T	Formaldehyde 37%	5	-17.1
Code	Omschrijving	Niveau	Degradatie conform EN ISO 374-4:2019 (%)														
K	Sodium hydroxide 40%	6	-25.7														
P	Hydrogen Peroxide 30%	2	44.8														
T	Formaldehyde 37%	5	-17.1														

Cytostatische geschiktheid Dit product voldoet aan de ASTM D6978-05-norm¹, met de volgende testprestaties:

	Minimale doorbraak-detectietijd*
Carmustine, 3.3mg/ml (3,300 ppm)	16.2 minuten
Cisplatin, 1.0mg/ml (1,000 ppm)	>240 minuten
Cyclophosphamide, 20.0mg/ml (20,000 ppm)	>240 minuten
Dacarbazine, 10.0mg/ml (10,000 ppm)	>240 minuten
Doxorubicin HCl, 2.0mg/ml (2,000 ppm)	>240 minuten
Etoposide, 20.00mg/ml (20,000 ppm)	>240 minuten
Fluorouracil 50.0mg/ml (50,000 ppm)	>240 minuten
Methotrexate, 25.0mg/ml (25,000 ppm)	>240 minuten
Mitomycin C, 0.5mg/ml (500 ppm)	>240 minuten
Paclitaxel (Taxol), 6.0mg/ml (6,000 ppm)	>240 minuten
Thiotepa, 10.0mg/ml (10,000 ppm)	28.4 minuten
Vincristine, 1.0mg/ml (1,000 ppm)	>240 minuten

Toepassingen Deze handschoenen zijn primair bedoeld en geschikt voor medisch (niet-steriel) gebruik tijdens kortdurende medische onderzoeken en procedures waarbij infectierisico van toepassing is.

- Overige specificaties
- Niet-steriel
 - Voor eenmalig gebruik
 - Tweehandig (ambidextreus)
 - Getextureerde vingertoppen
 - Hypo-allergeen en huidvriendelijk conform ISO 10993

Bestelinformatie Verpakt in dispensers van 200 handschoenen (180 bij maat XL) en vervolgens per 10 dispensers in een overdoos. Zie producttabel op de volgende pagina voor bestelcodes.

¹ Aangezien er nog geen Europese normen zijn voor cytostatische tests van handschoenen, wordt de primair voor de Amerikaanse markt opgestelde ASTM D6978-05-norm gehanteerd. Deze norm is daarnaast op diverse andere prestatievlakken vele malen stringenter dan de Europese EN 374-norm, zoals op het gebied van de doorbraak-testlimiet en de gehanteerde test-temperatuur, die aansluit bij de daadwerkelijke lichaamstemperatuur van een gebruiker (35 C° +/- 2), terwijl de EN374-norm werkt met een temperatuur van 23 C° +/- 1).

Producttabel

Standaard dispenser (BOX/200)

Productcode	Maat	Verpakkingseenheid	Besteleenheid
138555-XS-200	XS	BOX/200	10 x BOX/200
138555-S-200	S	BOX/200	10 x BOX/200
138555-M-200	M	BOX/200	10 x BOX/200
138555-L-200	L	BOX/200	10 x BOX/200
138555-XL-180	XL	BOX/180	10 x BOX/200

Goodpac+™ cube-dispenser (cuff-first)*

Productcode	Maat	Verpakkingseenheid	Besteleenheid
138555-XS-200-CCF	XS	BOX/200	10 x BOX/200
138555-S-200-CCF	S	BOX/200	10 x BOX/200
138555-M-200-CCF	M	BOX/200	10 x BOX/200
138555-L-200-CCF	L	BOX/200	10 x BOX/200
138555-XL-180-CCF	XL	BOX/180	10 x BOX/200

Goodpac+™ twin pack dispenser (cuff-first)*

Productcode	Maat	Verpakkingseenheid	Besteleenheid
138555-XS-200-TCF	XS	BOX/200	10 x BOX/200
138555-S-200-TCF	S	BOX/200	10 x BOX/200
138555-M-200-TCF	M	BOX/200	10 x BOX/200
138555-L-200-CCF	L	BOX/200	10 x BOX/200
138555-XL-180-CCF	XL	BOX/180	10 x BOX/200

*Zie de inhoudelijke brochure over de Goodpac+™-verpakkingen voor meer inhoudelijke informatie over dit nieuwe type verpakkingen.