

VENGFLOW™

Veilige bloedafnamenaalden



HUSK
HEALTHCARE
GROUP


Productomschrijving

De VenoFlow™ bloedafnamenaalden stellen u in staat om op veilige en gemakkelijke wijze bloed af te nemen. Indien nodig kunnen achter elkaar meerdere buizen worden aangesloten op de luer-connector, zonder dat u van naald hoeft te wisselen. Hierdoor kunt u snel het benodigde aantal buisjes afnemen.

Het veiligheidsmechanisme is gemakkelijk met één hand te activeren, zodat het product veilig afgevoerd kan worden en het risico op naaldprik-accidenten drastisch verlaagd wordt. Het veiligheidsmechanisme is onomkeerbaar: eenmaal geactiveerd is de naald niet meer te gebruiken.

De naald is gemaakt van hoogwaardig staal en heeft de juiste puntscherpte, zodat de afname zo pijnloos mogelijk verricht kan worden. Onafhankelijk laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat onze VenoFlow™ veilige bloedafnamenaalden tot wel 20% minder weerstand geven bij het aanprikken, waardoor de pijnvering bij de patiënt verlaagd wordt¹.

Wij leveren dit product in de gangbare maatvoeringen 21G (groene kleurcodering) en 22G (zwarte kleurcodering), en in twee uitvoeringen: met en zonder voorgemonteerde houder. De toegevoegde waarde van de voorgemonteerde houder is dat de buizen gemakkelijker en sneller op de luer-connector aangebracht kunnen worden.

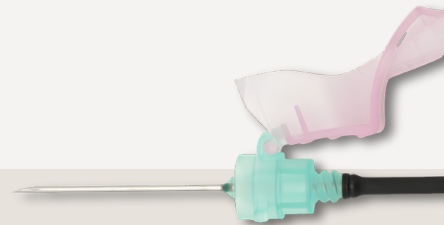

Overige specificaties

Latexvrij, steriel en voor eenmalig gebruik

Toepassing

De VenoFlow™ veilige bloedafnamenaalden worden gebruikt voor veneuze bloedafname binnen professionele zorgomgevingen. Ze zijn geschikt voor het veilig en efficiënt afnemen van één of meerdere bloedbuizen, waarbij het geïntegreerde veiligheidsmechanisme helpt het risico op naaldprik-accidenten na gebruik te verminderen.

¹Resultaten op aanvraag beschikbaar

Het product in detail



Bestelinformatie

Standaardversie (zonder houder)

Product-code	Kleur-codering	Gauge (G)	Diameter naald	Naaldlengte (inch/mm)	Verpakkings-eenheid
512174	Groen	21G	0.8 mm	1¼" (32 mm)	BOX/48
512175	Zwart	22G	0.7 mm	1¼" (32 mm)	BOX/48

Standaardversie (met houder)

Product-code	Kleur-codering	Gauge (G)	Diameter naald	Naaldlengte (inch/mm)	Verpakkings-eenheid
512174-H	Groen	21G	0.8 mm	1¼" (32 mm)	BOX/100
512175-H	Zwart	22G	0.7 mm	1¼" (32 mm)	BOX/100



Scan deze QR-code om de productpagina te bezoeken voor meer informatie.

VENOFLOW™

VENOFLOW™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**

Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: info@huskmedical.com

www.huskmedical.com

Versie nummer: 1.0

Publicatiedatum: 23-07-2026

